



**Breathe Right Burun Bantlarını kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Herhangi bir sorunuz olursa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.**

## 1. Breathe Right Burun Bantları nedir ve niçin kullanılır?

Breathe Right Burun Bantları daha iyi hava akışını sağlamak için burun kanatlarını hafifçe kaldırarak burun kanallarını açar.

İlaç içermeyen Breathe Right Burun Bantlarının daha kolay nefes alabilmeniz için burun kanallarını anında açtığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

Breathe Right Burun Bantları alerji ve soğuk algınlığı nedeniyle burunda oluşan tıkanıklıklarda rahatlama sağlamak için gece veya gündüz kullanılabilir.

Eğer aşağıdaki sorunlarınız varsa kullanınız:

### Burun tıkanıklığı

Breathe Right Burun Bantları alerji ve soğuk algınlığı nedeniyle burunda oluşan tıkanıklıklarda geçici rahatlama sağlayarak daha iyi nefes almaya yardımcı olmak için burnun açılmasına yardımcı olur. Breathe Right Burun Bantları burundaki septum deviasyonu nedeniyle tıkanıklık ve nefes alma güçlüğü belirtilerinde geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Bu bantlar kesin cerrahi düzeltmeye alternatif olarak düşünülmemelidir.

### Horlama

Ağız yerine burundan daha kolay nefes alma olanağı sağlayarak, horlamayı azaltmaya, hatta ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Horlamanın hafiflemesinde en iyi sonucun elde edilebilmesi için gece kullanılması tavsiye edilir.

Breathe Right Burun Bantları herhangi bir ilaç ile birlikte kullanılabilir.

## 2. Breathe Right Burun Bantları nasıl kullanılır?

Tek kullanımlıdır. Her bandı sadece bir kez kullanınız. Gece veya gündüz kullanabilirsiniz. Ürünü doğru şekilde yapıştırmanız üründen maksimum performansı almanızı sağlayacaktır. Ne çok yukarıya, ne de çok aşağıya yerleştiriniz.

Bandın boyutu önemlidir, en iyi sonucu elde edebilmek için doğru boyutu kullanın. Küçük / orta boy burun bantları genel olarak burunların % 75'ine uyar, büyük boy burun bantları daha büyük burunlu yetişkinler içindir. Özel esnek yay benzeri bant, burun kanatlarını hafifçe yukarı kaldırır.

Kuru/hassas ciltler için şeffaf olan ürün tipini kullanınız.

Breathe Right Çocuk Burun Bantları 5 ile 11 yaş arası çocuklarda yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Breathe Right Çocuk Burun Bantları küçük burunlara uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.



**1** **Temizleyin:** Kir ve yağı temizlemek için burnunuzu yıkayınız ve kurulayınız. (Yağlı ciltler için gözenek sıkılaştırıcı kullanınız.)



**2** **Yerleştirin:** İç kısımdaki koruyucu tabakayı çıkarınız ve bandı burnunuzun üzerine yerleştiriniz.



**3** **Uygulayın:** Burun bandını yapışması için her iki ucundan hafifçe ovarak bastırınız.



**4** **Çıkarın:** Yüzünüzü ılık suyla yıkayarak veya duştaiken Breathe Right Burun Bandını çıkarın. Bandı her zaman yavaşça çıkarınız. Uçları gevşetiniz ve sonra bandı her iki ucundan hafifçe kaldırınız. Cilt reaksiyonları veya yaralanma olasılığını azaltmak amacıyla su ile düzgün bir şekilde çıkarınız.



### 3. Güvenliğiniz için Uyarılar ve Önlemler

- Yalnızca haricen kullanılır.
- Yaraların üzerine, güneş yanığı veya tahriş olmuş cilt üzerinde kullanmayınız.
- Döküntü veya cilt tahrişi oluşursa, kullanmayı bırakınız.
- Günde 12 saatten fazla kullanmayınız.
- Performans nedeniyle bantlar tek kullanımlıktır. Burun bandı çıkarıldıktan sonra bant yapışkanlığını kaybeder ve tekrar yapıştırıldığında sabit durmaz.
- Ürünü çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- 5 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
- Bantların paketlenmediği kağıt kılıf alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk lateks içerebilir.
- Bu ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa bir sağlık uzmanına danışınız.


#### AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA KULLANMAYINIZ

Lateks veya Breathe Right Burun Bantlarına alerjiniz varsa kullanmayınız.

Uyku Apnesi: Breathe Right Burun Bantları uyku apnesini tedavi etmek için tasarlanmamıştır. Uyku apnesi belirtileriniz varsa doktorunuza danışınız. Bazı kişiler Breathe Right Burun Bantlarını kullanırken advers etkilerle karşılaşabilirler. Bu etkiler uygulama alanındaki reaksiyonlar (örn: eritem, tahriş, ağrı, döküntü, soyulma, kanama, çizilme ve renk değişikliği) ve kızarıklık, kaşıntı ve yüzde ödem dahil olmak üzere aşırı hassasiyet gibi etkiler olabilir.

Bu ürünle ilgili olarak meydana gelebilecek herhangi bir ciddi olay üreticiye bildirilmelidir. Bu bildirimler, tıbbi cihazdaki hataların belirlenmesinde yardımcı olabileceği ve benzer olayların tekrarlanmasını önleyebileceği için önemlidir.

#### 4. Breathe Right Burun Bantları nasıl saklanır?

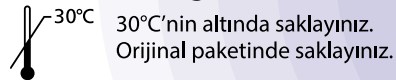



Lütfen ürünü yerel gerekliliklere uygun olacak şekilde imha ediniz ve her zaman çevremizi düşününüz.

Ürünü ambalaj üzerinde gösterilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

#### 5. Ek bilgiler

Burun bantlarına soğuk mühür yapıstırılıp tekli paketler halinde ayrı ayrı ambalajlanmıştır. Soğuk mühürlü ambalajlar karton kutuların içine konulmuştur.

 Dikkat: Ürünü kullanmadan önce, paket içerisinde yer alan kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.


 Hasarlı ambalajlı ürünleri kullanmayınız.

 Tek kullanımlık: Burun bantları tek kullanımlıktır.


 Bantların etrafında yer alan şeritler doğal kauçuk lateks içerebilir.

 Seri numarası: Kartonun üzerindedir.

 Üretim Tarihi.

 YYYY-AA olmak üzere son kullanım tarihi.

 Üretici firma:  
Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, ABD.

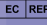 İthalatçı: Casel İlaç Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Talatpaşa M. Pazaryolu C. No.4 Esenyurt/İstanbul

[www.casel.com](http://www.casel.com)  
[www.breatheright.com](http://www.breatheright.com)

 Bu ürün AB'de CE işaretlidir

 Tıbbi Cihaz

Tarih: Şubat 2021

Ticari markalar FCB'ye aittir veya FCB tarafından lisans verilmiştir.  
© 2021 FCB veya lisans veren firma.

31050433